

唐德医用防压疮翻身气垫床

台湾专业研发制造

Savvy 8230

Made in Taiwan 品质最可靠



台湾精品2015
TAIWAN EXCELLENCE




分段式两用充气扶手,可预防使用者翻身时的碰撞及避免床撑起时折管



唐德独家快速扶手充泄气阀只需开启泄气阀,使用者即可轻松上下床




- 8寸20管防压疮翻身气垫床适用于瘫痪、昏迷、术后或重病需长期卧床无法自行翻身者。
- 本产品同时具备交替减压,脉动减压,静态减压及左右翻身功能。完全交替减压实践零压理论可预防压疮发生;脉动及静态减压让病患沉於床内并促进血液循环,提升舒适度;定时翻身可减缓肺部分泌物及降低细菌感染机率,有效促进血液循环。

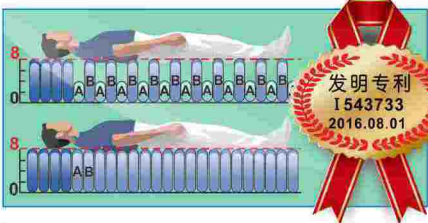

发明专利
1543733
2016.08.01

唐德发明专利 完全交替不晕床 睡得更安稳


床垫维持固定高度,不因床管充泄气而上下移动造成晕床现象。完全交替技术使床管皆充气至同一高度后再进行泄气,气垫床高度不变增添使用者舒适度及睡眠质量。

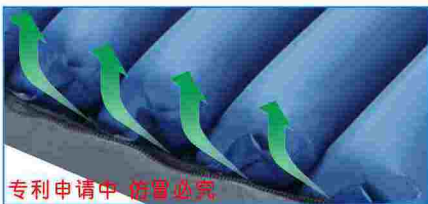

专利申请中 仿冒必究

唐德独家设计 独立式微漏气(iLAL) 睡得更乾爽


利用床管交替时所排出的空气送回床垫内,藉以带走气垫床多馀的热气及湿气,降低床垫温度确保床垫乾爽舒适,每次交替约有1/2床垫体积的空气经由30个1.5mm的小孔排出,最大可达70-80公升,停电时仍可支撑病患24小时以上。一般气垫床於床管设置直径约0.1mm喷气孔,整床约含10~30小孔,两者喷气孔面积相差高达225倍,停电时无法支撑病患提高褥疮产生风险。

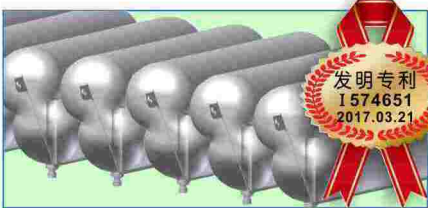

发明专利
1574651
2017.03.21

唐德发明专利 囊中管床管接头 睡得更可靠

独家设计囊中管接头,将所有接头及排管设计於床管底部,突破业界传统设计将排管设置於床侧,容易因家属探病坐压或移动病患而造成排管接头脱落漏气的风险。徒手即可拆装清洗,不须任何工具。管上管式安全防护气囊“cell-on-cell”科技搭配唐德独家发明专利囊中管使气垫床在停电时仍可支撑病人重量达24小时,避免因停电床垫下陷而产生压疮。

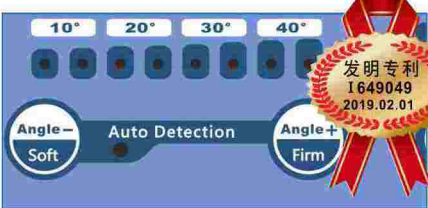

发明专利
1649049
2019.02.01

唐德独家设计 相对压力校准 睡得更香甜

不论高山或平地、夏天或冬天、白天或晚上,唐德采用相对压力校准,达到气垫床软硬恒定,不因环境温度差及海拔地形的变化而压力失准。



唐德特别设计 脚跟区域完全零压 睡得更放心

脚跟是压疮发生的高风险部位,唐德特别设置三支床管降低高度以确保脚跟完全在零压的保护下降低压疮发生的风险,若脚跟已有压疮发生更可加快压疮的复原速度。



AKTC[®]
唐德工业股份有限公司
Since 1989



床罩采用 零接缝医疗级双向弹性布 睡得更安心

零接缝床罩防止血水体液渗入,通过多项生物相容性测试之双向弹性布可减少肌肤与床罩所产生的剪力与摩擦力,有效防止压疮的产生。使用可拆式塑钢拉链,上罩,可用洗衣机与烘乾机水洗与烘乾。



唐德发明专利 快充转式Q-CPR

独家设计接头可於一分钟内快速充、泄气,节省安装时间。简单一转,即可在急救时把气垫床内的空气迅速排出并进行心肺复苏术。另可加购快速充气鼓风机加速气垫床安装或收纳时的充泄气。

车缝固定鸟眼布床管固定带可防止气垫床使用时造成的滑动,传统塑胶固定带易脱落且无法维修,一旦损坏需更换整组下罩

两段式做起侦测,25度停止翻身,避免落床风险,45度启动自动充气,避免臀部直接著床

弹力式挂勾,操作不晃动,降低因震动引起之噪音

唐德专利床管快接,拆装容易,方便床管更换

数位智慧型变频空气泵浦

- 有声异常警报** (Audible abnormal alarm)
- 整合式快速接头** (Integrated quick connector)
- 8段压力与8段翻身角度调整搭配自动体型侦测调压功能** (8 pressure levels and 8翻身 angles adjustment with automatic body detection and pressure adjustment function)
- 面板自动锁定功能** (Panel auto-lock function)
- 三种翻身模式选择: 左翻身/全翻身/右翻身** (Three翻身 modes: Left翻身, Full翻身, Right翻身)
- 数位LED萤幕显示循环时间和警示讯息** (Digital LED display showing cycle time and warning messages)
- Auto Firm** (自动充气缓解搬运病人时的负担,并可用于病人坐起时加压防止"Bottoming-out")
- 三种减压模式选择: 交替减压,脉动减压,持续低压护理模式** (Three pressure relief modes: Alternating pressure, Pulsatile pressure, Continuous low pressure care mode)

产品规格

泵浦		气垫床	
交替模式	2-1交替减压	尺寸(长x宽x高)	200x90x20公分 200x90x40公分(翻身最大高度) 200x90x50公分(翻身最大高度含扶手)
尺寸(长x宽x高)	42x12.8x23.2公分	重量	14公斤
重量	5.2公斤	最大载重	255公斤
控制方式	电子式(数位按键+LED显示器)	床管数	20管(3x8"头枕管+14x8"管上管+3x6"脚管)+6x4"侧扶手管
流量	9.0L+9.0L	床管材质	尼龙+TPU聚氨酯(醚类)
可调压力范围	8段 25~60 (+/-5)mmHg	上罩材质	双向弹性布(零接缝,防水透湿,防霉抗菌,生物相容,水洗温度95度,防火等级BS7175:Crib5)
电压/频率	230V/50Hz	底垫材质	聚酯纤维+PU聚氨酯
交替循环时间	10 / 15 / 20 分钟	CPR快速泄气	专利快充转式Q-CPR
脉动循环时间	10 / 15 / 20 分钟		
翻身时间	5~95 分钟(每5分钟间隔) 翻身模式:左翻身 / 全翻身 / 右翻身		
翻身角度	8段,可调整		
有声异常警报	断电警报 / 低压警报 / 服务警报 错误代码检视		
保险丝额定	T1A / 250V		
外壳防尘防水等级	IP21		
安规认证	IEC60601-1 医疗电子器材电性安全测试 IEC60601-1-2 电磁相容性		

唐德工业股份有限公司

324 台湾桃园市平镇区涌丰里工业五路3号
消费者服务专线: 0800-211-365
电话: (03)419-4567 传真: (03)469-3789
电邮: service@aktc.com.tw
网址: www.aktc.com.tw



代理及售后机构: 云南益健贸易有限公司
地址: 昆明市白塔路308号1单元404
电话: 0871-63183456 手机: 13354646200